
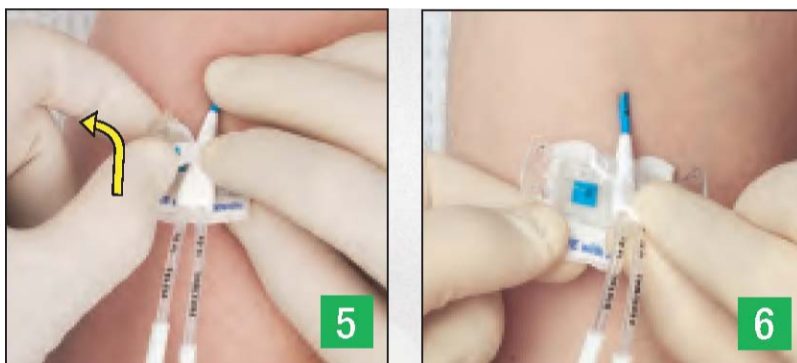
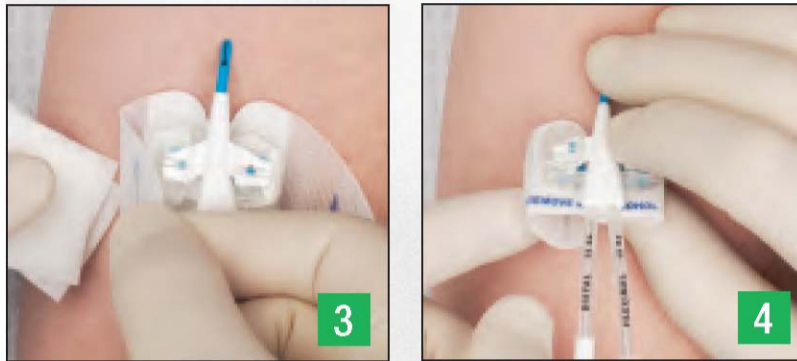


Retrait

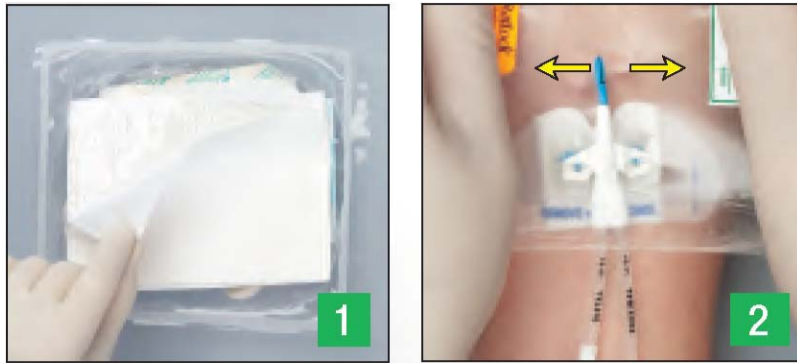

Préparer

1. Ouvrir le kit StatLock® PICC et préparer le champ stérile selon le protocole en vigueur dans l'établissement.
2. Utiliser des gants non stériles pour retirer le film transparent en utilisant la technique « d'étirement ».

Dissoudre

3. En se mettant dans des conditions stériles, soulever le bord de la partie adhésive du Statlock® en utilisant la lingette alcoolisée fournie. Continuer jusqu'à complètement décoller la surface de la peau. Ne pas tirer ni forcer.



Note: Des adhésifs stériles peuvent être utilisés pour stabiliser temporairement les cathéters non siliconés. A retirer avant de nettoyer le site d'insertion.

4. Replier la partie adhésive du Statlock® comme indiqué sur l'image.

Désadapter

5. Stabiliser le cathéter avec le doigt tout en maintenant le Statlock®. Puis, utiliser le pouce de la main opposée pour lentement soulever les ailettes tout en pressant avec l'index, comme indiqué sur l'image. Repositionner les mains et répéter l'opération avec la 2^{de} ailette.
6. Retirer le PICC avec précaution.

Mise en place

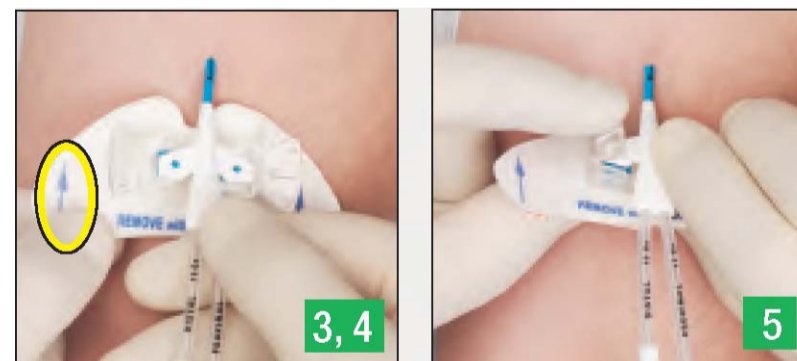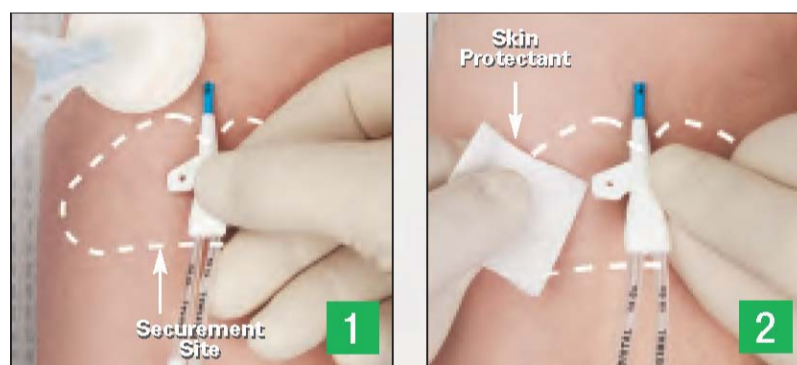

Préparer

1. Nettoyer le point de sortie du cathéter avec la solution Chloraprep®, de l'alcool ou selon le protocole en vigueur dans l'établissement.
2. Appliquer la solution de protection cutanée (fournie dans le kit). Laisser sécher entièrement (10-15 secondes).

Insérer

3. Aligner le Statlock® avec le point de sortie du cathéter de sorte que la flèche pointe en direction du point de sortie.

Version mobile

Mettre le 1^{er} picot du Statlock® dans un trou de suture du cathéter puis faire glisser le 2^{eme} picot pour faire coïncider avec le 2^{eme} trou de suture

Version fixe

Positionner les picots du Statlock® dans les trous de suture des ailettes du cathéter.

5. Maintenir le Statlock® par en-dessous lors de la fermeture des ailettes de maintien.

Peler et Fixer

6. Peler le papier protecteur et l'appliquer sur la peau, un côté après l'autre.
7. Appliquer un film transparent selon le protocole en vigueur dans l'établissement.
8. Appliquer les deux étiquettes fournies.

Les systèmes StatLock® sont stériles et sans latex.

Les systèmes StatLock® doivent être contrôlés quotidiennement et doivent être remplacés dès que l'examen clinique montre que cela est nécessaire, au moins une fois tous les 7 jours. Le site d'insertion du cathéter doit être entretenu selon le protocole en vigueur dans l'établissement. Les systèmes Statlock® sont contre-indiqués pour les patients allergiques aux pansements ou adhésifs. Veuillez vous référer à la notice d'utilisation.

Bard et Statlock® sont des marques déposées de C.R. Bard, Inc. ou affiliés, Chloraprep est une marque déposée de Medi-flex, Inc. Venetec International, Inc. est une filiale de C.R. Bard, Inc. Copyright 2006 C.R. Bard, Inc. Tous droits réservés.